



BD SafeStep™

Ensemble d'aiguilles Huber


Points à pratiquer*

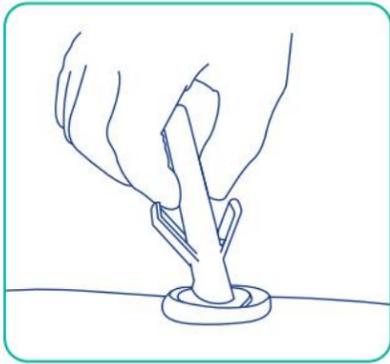


1 Préparez le site du port pour un accès stérile en suivant le protocole de l'établissement.

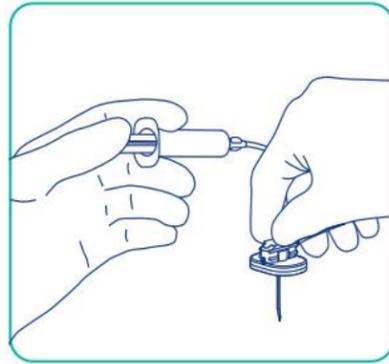


2 Ensemble de perfusion Prime utilisant technique aseptique suivant le protocole de l'établissement.

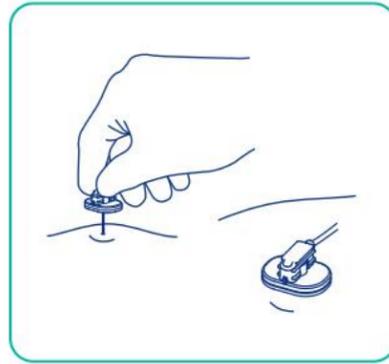


3 Insérer l'aiguille perpendiculairement dans le septum du port.
Remarque : la poignée texturée et la base ne sont pas connectées.
Vous pouvez positionner la base sur la peau selon vos besoins.

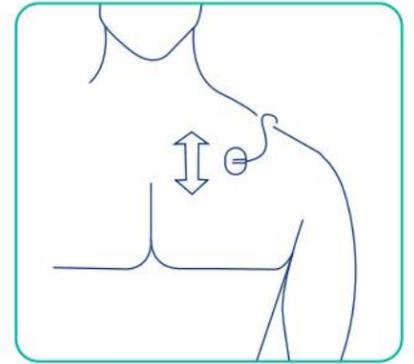


Base Orient en simple ou deux ports comme indiqué.

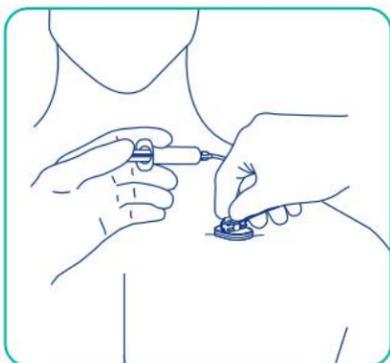


5. Vérifier le bon positionnement de l'aiguille en aspirant du sang. Rincer conformément au protocole de l'établissement et fermer la pince sur la tubulure d'extension.

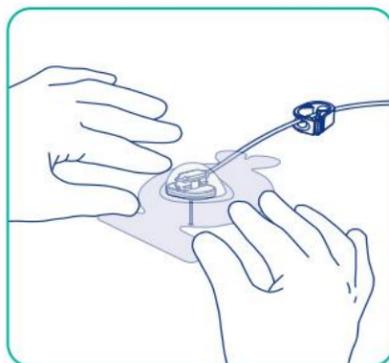

6 Habillez-vous et sécurisez le site selon le protocole institutionnel. Commencer l'injection, la perfusion ou l'aspiration sanguine selon la procédure institutionnelle.

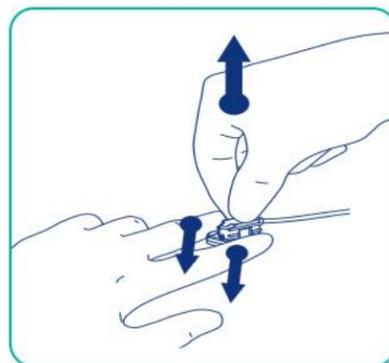

7 Pour désactiver : stabilisez le port en maintenant fermement la base vers le bas.

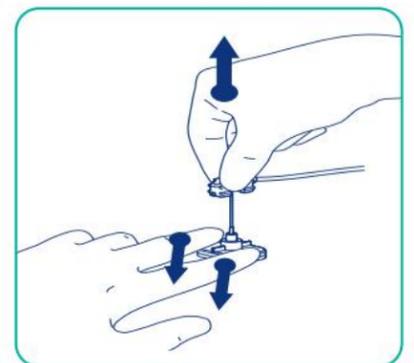

8. Tirez fermement la poignée texturée vers le haut jusqu'à ce que vous sentiez une butée ferme et que l'aiguille soit verrouillée en position de sécurité. Jetez l'ensemble dans un conteneur pour objets tranchants.



Utiliser une technique aseptique. Se référer à l'illustration 1 pour utiliser ce dispositif. Vérifiez toujours l'intégrité de la peau du patient au niveau du septum du port avant d'accéder au site.

Suppression:

- 1 Une fois le traitement terminé, rincer le port conformément au protocole de l'établissement. Fermer la pince tout en injectant les 0,5 ml restants de solution.
- 2 Avec la main non dominante, stabilisez le port.
- 3 Désactivez l'accès conformément aux instructions de l'appareil approprié, comme indiqué ci-dessus.

* Veuillez consulter les étiquettes et les notices des produits pour connaître les indications, contre-indications, dangers, avertissements, précautions et modes d'emploi.