

POCHE URINE VIDANGEABLE AVEC VALVE ANTIREFLUX

Caractéristiques Techniques

| | |
|------------------------------|--|
| Corps de la poche: | réalisé en PVC atoxique, souple et résistant SANS DEHP |
| Couleur de la poche: | transparent ou blanche opaque et transparent |
| Tubulure de la poche: | réalisée en PVC atoxique, transparent, la haute qualité du granule de PVC utilisé confère l'effet «mémoire» à la tubulure face aux pliages éventuels. Le longueur de la tubulure peut être adapté aux exigences du client (90 - 150 cm.). |
| Raccord: | universel, blanche en PVC atoxique |
| Valve de non-retour: | étroite, pour éviter le reflux de l'urine et des gaz |
| Robinet de vidange: | réalisée en PVC du type à ressort qui permette de vider rapidement et aisément la poche. Disponible à déclic ou à croix |
| Soudure: | double, résistance excellente |
| Points d'attache: | 4, renforcés pour permettre une fixation stable, par un dispositif adéquat, au lit et des manipulations et transfèrements sûres de la poche. |
| Graduation: | asymétrique pour permettre une correcte lecture du liquide contenu |
| Capacité de la poche: | 2 l. |
| Stérilisation: | sur demande, réalisée par un mélange de ETO + CO2 |
| Marque de commerce: | Securdrain Vià! Urodren by Securmed |
| Code LPPR: | 1153071 – 103A03.212 1118270 (conditionnement en boites de 10 pcs) 1139390 (conditionnement en boites de 30 pcs) |
| Code Cladimed: | G50AB01 |

Informations pour l'utilisation

MODE D'EMPLOI

Utilisation

1. Ouvrez l'emballage et retirez la poche à urine de l'emballage
2. Inspectez et ne pas utiliser si l'emballage individuel est ouvert / endommagé ou si le dispositif est défectueux
3. Accrochez la poche à urine au pied du lit, fixer verticalement le système de recueil et positionner le tube de connexion pour permettre un écoulement facile
4. Fixez le tube de connexion avec une pince
5. Connecter le connecteur de l'entonnoir d'évacuation de la sonde

Changement d'une poche à urine

- Utiliser les gants pour le vidange
- Retirer la poche utilisée
- Fermer le robinet de vidange
- Effacer le raccord de la sonde urinaire
- Connecter une autre poche au raccord de la sonde

Écoulement

Éliminer conformément aux réglementations nationales et locales sur les déchets médicaux contaminés.


Stockage

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit sec à température ambiante comprises entre +10 ° C et +35 ° C.


Le produit doit être protégé de la chaleur et de la lumière solaire directe. L'entreposage doit éviter les températures élevées, une forte humidité, sans gaz érosive et avec une bonne aération

La stérilité est assurée pendant 5 ans, sauf si l'emballage est ouvert ou endommagé.

Dessin Technique

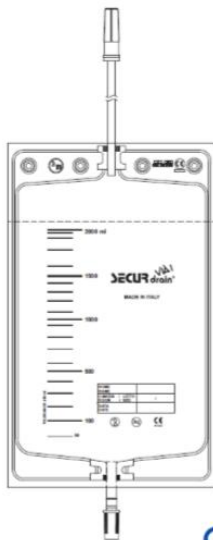

AVEC ROBINET A DECLIC

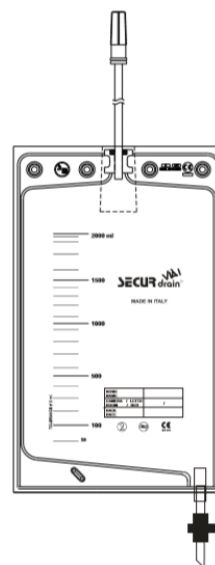

AVEC ROBINET A CROIX

Codifications et emballage

| CODE | DESCRIPTION | |
|--------------|--|-------------------------------|
| 001019037900 | POCHE URINE DE LIT, CAPACITE 2000ML, TUBULURE 90 CM, AVEC VALVE ANTI RETORU, VIDANGE A DECLIC, EN VRAC | 250 PCS CARTON 39*29*34 CM |
| 001019037903 | POCHE URINE DE LIT, CAPACITE 2000ML, TUBULURE 90 CM, AVEC VALVE ANTI RETORU, VIDANGE A DECLIC, EN VRAC | 200 PCS CARTON 39*29*34 CM |
| 001013037900 | POCHE URINE DE LIT, CAPACITE 2000ML, TUBULURE 90 CM, AVEC VALVE ANTI RETORU, VIDANGE A DECLIC, BOITE DE 10 PCS | 250 PCS CARTON 39*29*34 CM |
| 001014037900 | POCHE URINE DE LIT, CAPACITE 2000ML, TUBULURE 90 CM, AVEC VALVE ANTI RETORU, VIDANGE A DECLIC, BOITE DE 30 PCS | 210 PCS CARTON 39*29*34 CM |
| 001011037900 | POCHE URINE DE LIT, CAPACITE 2000ML, TUBULURE 90 CM, AVEC VALVE ANTI RETORU, VIDANGE A DECLIC, STERIOE | 100 PCS CARTON 39*29*34 CM |

Etiquetage (exemple)



Securmed
 medical supplies and accessories
 SECURMED S. P.A.
 VIA MONTE GRAPPA, 2/G
 36016 THIENE (VI) - ITALY

securdrain
 vibr

I SACCA URINA : CON RUBINETTO TIRA SPINGI
 GB URINE BAG : WITH PUSH PULL OUTLET
 F POCHE A URINE : AVEC ROBINET DE VIDANGE A DECLIC
 P SACO DE URINA : WITH PUSH PULL OUTLET
 N URINE ZAK : WITH PUSH PULL OUTLET

Tubo / Tube / Tubulure / Tubo / Tube 90 cm
 Volume 2000 ml
 Q.tà / Q.ty / Q.té / Q.de / Bedragen 250

LOT 19F02
 2022 - 05 2017 - 06
 REF 001019037900

8 025500 001052

I - NON ESPORRE A TEMPERATURE ESTREME E/O ECCESSIVA UMIDITA'. NON CONTIENE LATTICE.
 GB - DO NOT EXPOSE TO EXTREME TEMPERATURES AND/OR HUMIDITY. LATEX FREE.
 F - NE PAS EXPOSER A TEMPERATURES ET/OU HUMIDITE EXTREMES. SANS LATEX.
 P - NAO EXPOR A TEMPERATURAS EXTREIMAS E/OU EXCESSIVA HUMIDADE. ISENTO DE LATEX.
 N - NIET BLOOTSTELLEN AAN EXTREME TEMPERATUUR EN/OF VOCHTIGHEID. GEEN LATEX.

CE 0123 NON STERILE

DEHP FREE

Explications des Symboles Graphiques



Usage Unique



Garder au sec



DEHP FREE

Sans DEHP



du soleil

Tenir à l'écart de la lumière



Materiau Recyclable



Non Sterile



Code de Lot



Date de Péréption



Fabriquant